



Leia as instruções de utilização do inalador de Enerzair Breezhaler antes de utilizar.

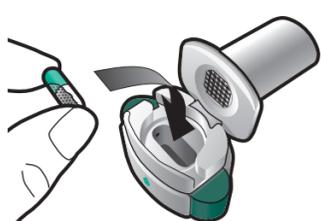


Insira

1

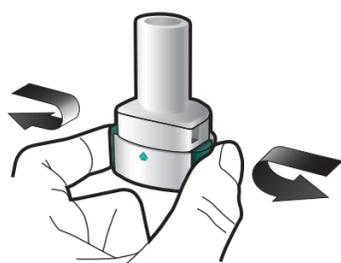


Perfure e solte

2

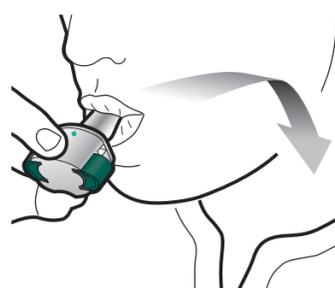

Inale profundamente

3

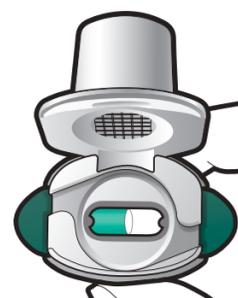

Verifique se a cápsula está vazia


Verificar



Passo 1a:
Retire a tampa



Passo 1b:
Abra o inalador

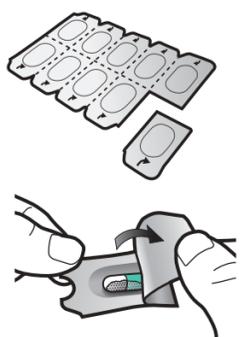


Passo 1c:
Remova a cápsula
Separe um dos blisters da tira. Retire a película protetora do blister e retire a cápsula. Não pressione a cápsula através da película de alumínio. Não engula a cápsula.



Passo 1d:
Insira a cápsula
Nunca coloque a cápsula diretamente no aplicador bucal.



Passo 1e:
Feche o inalador

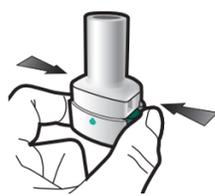

Passo 2a:
Perfure a cápsula uma vez
Segure o inalador verticalmente. Perfure a cápsula pressionando firmemente ambos os botões laterais ao mesmo tempo. Deve ouvir um barulho quando a cápsula for perfurada. Perfure a cápsula apenas uma vez.



Passo 2b:
Solte os botões laterais



Passo 3a:
Expire totalmente
Não sopre para o inalador.




Passo 3b:
Inale profundamente o medicamento
Segure o inalador conforme a figura. Coloque o aplicador bucal na boca e feche os lábios firmemente à volta do aplicador bucal. Não pressione os botões laterais. Inspire rapidamente e o mais profundamente que conseguir. Durante a inalação vai ouvir um zumbido. Poderá sentir o sabor do medicamento enquanto inspira.



Passo 3c:
Sustenha a respiração
Sustenha a respiração durante pelo menos 5 segundos.

Passo 3d:
Lavar a boca
Bocheche com água após cada administração.

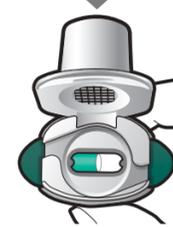

Verifique se a cápsula está vazia
Abra o inalador para verificar se ainda existe algum pó na cápsula.

Se ainda existir pó na cápsula:

- Feche o inalador.
- Repita os passos 3a a 3d



Pó remanescente

Vazia




Retire a cápsula vazia
Coloque a cápsula vazia no seu lixo doméstico. Feche o inalador e reponha a tampa.

Informação Importante

- As cápsulas de Enerzair Breezhaler devem ser sempre conservadas no blister e apenas devem ser retiradas imediatamente antes da utilização.
- Não pressione a cápsula através da película de alumínio para a retirar do blister.
- Não engula a cápsula.
- Não utilize Enerzair Breezhaler cápsulas com qualquer outro inalador.
- Não utilize o Inalador Enerzair Breezhaler para tomar qualquer outro medicamento em cápsula.
- Nunca coloque a cápsula na sua boca ou no aplicador bucal do inalador.
- Não pressione os botões laterais mais do que uma vez.
- Não sopre para o inalador do bucal.
- Não pressione os botões laterais enquanto inala através do aplicador bucal.
- Não manuseie as cápsulas com as mãos molhadas.
- Nunca limpe o seu inalador com água.

A sua embalagem de Inalador Enerzair Breezhaler contém:

- Um inalador de Inalador Enerzair Breezhaler
- Um ou mais blisters, cada um contendo 6 ou 10 cápsulas de Enerzair Breezhaler para serem usadas com o inalador

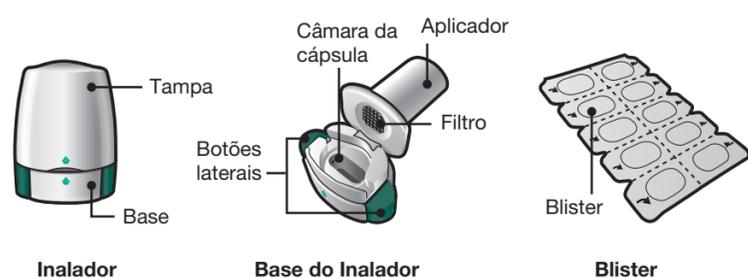

Inalador

Base do Inalador

Blisters

Perguntas Frequentes

Porque é que o inalador não fez um barulho quando inalei?

A cápsula pode estar presa na câmara da cápsula. Se tal acontecer, solte cuidadosamente a cápsula batendo na base do inalador. Inale novamente o medicamento, repetindo os passos 3a a 3d.

O que devo fazer se existir pó remanescente dentro da cápsula?

Não tomou a quantidade suficiente do seu medicamento. Feche o inalador e repita os passos 3a a 3d.

Eu tossi após a inalação – isso importa?

Tal pode acontecer. Desde que a cápsula esteja vazia, você recebeu quantidade suficiente do seu medicamento.

Senti bocados pequenos da cápsula na minha língua – isso importa?

Tal pode acontecer. Não é prejudicial. A probabilidade da cápsula se partir em pequenos bocados aumenta se a cápsula for perfurada mais do que uma vez.

Limpar o inalador

Limpe o aplicador bucal por dentro e por fora com um pano limpo, seco e sem pelos para remover qualquer resíduo de pó. Mantenha o inalador seco. Nunca limpe o seu inalador com água.

Eliminação do inalador após uso

Cada inalador deve ser eliminado após todas as cápsulas terem sido utilizadas. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os inaladores que já não necessita.